

# DISINCROSTANTI



## Descrizione:

Il **KALK-C** è un formulato specifico a base di acidi naturali indicato per il trattamento disincrostante su superfici particolarmente delicate.

Questa sua caratteristica lo rende incredibilmente sicuro e idoneo a prevenire ed eliminare i residui di calcare senza intaccare minimamente le superfici a prescindere dal materiale con cui sono fatte e dalla frequenza dei lavaggi.

Utilizzato in modo corretto la sua azione sequestrante permette alle superfici trattate di rimanere senza macchie e senza residui di calcare mantenendo inalterata la brillantezza originale.

## Applicazioni:

Il **KALK-C**, può essere utilizzato in lavapadelle ospedaliere indipendentemente dal modello e dalla durezza dell'acqua. Per le modalità di utilizzo attenersi a quelle consigliate in questa scheda tecnica oppure seguire quelle del costruttore del vostro macchinario.

## Vantaggi di utilizzo:

- Grazie alla sua composizione, risulta essere compatibile con tutti i modelli di macchinari adibiti al lavaggio di padelle ospedaliere, indipendentemente dalla marca o modello..

- Utilizzabile sempre e indipendentemente dalla durezza dell'acqua utilizzata.

- Previene l'accumulo di depositi calcarei sia all'interno dei macchinari, negli condotti di scarico, offrendo superfici lucenti, senza aloni e basso costo di utilizzo.

## DATI TECNICI:

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aspetto:</b>             | <b>Liquido limpido</b>      |
| <b>Colore:</b>              | <b>Incolore</b>             |
| <b>Odore:</b>               | <b>Inodore</b>              |
| <b>Densità:</b>             | <b>1,12 kg/lit (a 20°C)</b> |
| <b>PH:</b>                  | <b>ca. 2 (tal quale)</b>    |
| <b>Solubilità in acqua:</b> | <b>Molto buona</b>          |

# KALK-C

**AGENTE ANTICALCARE PER  
LAVAPADELLE OSPEDALIERI**



**QUESTO PRODOTTO E'  
REPERIBILE ANCHE SUI PORTALI  
DEL MERCATO ELETTRONICO  
RISERVATO ALLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI**

**acquistinretepa.it**  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



## Modo d'uso:

Il **KALK-C**, può essere utilizzato in lavapadelle ospedaliere impostando un dosaggio che può variare da 0,5 - 2,0 ml/L a seconda della durezza dell'acqua.

## Confezioni:

Taniche da 5 L

**INTECH-CR SRL:**

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: [www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) Mail: [info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

**INTECH**  
maintenance quality solutions